

PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL URINALISA SIKLUS I TAHUN 2026

PENYELENGGARA :

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11 Tamalanrea Makassar 90245
Email : pmebbkkmakassar@gmail.com

Website : <https://simpler.bblabkesmasmakassar.go.id>

1. BAHAN UJI

Bahan uji yang dikirim merupakan bahan uji urine dalam bentuk cairan yang terdiri dari 2 (dua) botol untuk tiap siklus dengan kode bahan yang berbeda dan dikerjakan pada tanggal yang sama.

2. STABILITAS DAN PENERIMAAN BAHAN UJI

- Bahan uji yang diterima diperiksa secara visual, dan segera simpan pada suhu 2°-8°C (Lemari Es). Jika bahan uji yang diterima rusak/tidak laik segera laporkan kepada penyelenggara.
- Tanda terima bahan uji dilakukan secara Online melalui aplikasi <https://simpler.bblabkesmasmakassar.go.id> segera setelah bahan uji diterima.
 - Login dengan memasukkan E-mail address dan password
 - Pilih hasil pemeriksaan
 - Pilih tanda terima bahan
 - Isi tanggal terima bahan, nama penerima bahan uji, ketersediaan juklat dan kode

bahan uji yang diterima, kondisi bahan uji ketika diterima.

- Pilih simpan

PERHATIAN

Bahan uji berasal dari manusia, oleh karena itu bahaya terinfeksi dapat terjadi. Kerjakan secara hati-hati dengan memperhatikan teknik-teknik keamanan kerja laboratorium.

3. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- Bahan diperiksa setelah dikeluarkan dari lemari es, diamankan selama 30 menit pada suhu kamar.
- Homogenkan urine dengan cara botol dibolak-balik beberapa kali sehingga isi dalam botol tercampur dengan sempurna. Jangan dikocok agar *tidak terjadi busa*.
- Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan parameter yang tertera dalam input hasil dengan menggunakan metode pemeriksaan dan alat yang biasa dilakukan di laboratorium saudara dan diperlakukan sama seperti sampel sehari-hari.

4. CARA DOWNLOAD PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGISIAN HASIL ONLINE PNPME

Petunjuk pelaksanaan dapat di download di aplikasi

<https://simpler.bblabkesmasmakassar.go.id>

- Login dengan memasukkan E-mail Address dan password
- Pilih Download
- Pilih Download Manual book dan Juknis Download Juklak pilih bidang yang diikuti (**Untuk Petunjuk Pelaksanaan**)
- Pilih Download Manual Book dan Juknis Download Manual Book Input Hasil pada

Bidang yang diikuti (**Untuk Pengisian Hasil Online**)

- Ketentuan mengisi hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Hasil pemeriksaan parameter pH dan BJ berupa data kuantitatif.
 - Hasil pemeriksaan parameter Protein, Glukosa, Billirubin, Urobilinogen, Darah, Keton dan Lekosit berupa data semi kuantitatif (+5, +4, +3, +2, +1 dan negatif)
 - Hasil pemeriksaan parameter Nitrit dan Test Kehamilan berupa Data Kualitatif (positif atau negatif).
- Bila ada komentar dan saran, dapat ditulis dibawah kolom CATATAN
- Teliti apakah hasil yang diisi sudah benar dan sesuai dengan cara penginputan hasil.
- Hasil yang sudah terkirim ke penyelenggara kemudian di cetak untuk sebagai bukti telah melakukan penginputan hasil.

5. WAKTU PELAKSANAAN

Bahan uji diperiksa secara serentak oleh semua laboratorium peserta pada tanggal :

18 Mei 2026

6. WAKTU PENGISIAN HASIL ONLINE

- Waktu pengisian hasil online selambat-lambatnya tanggal :

20 Mei 2026
- Keterlambatan pengisian hasil berakibat hasil pemeriksaan saudara tidak dapat dievaluasi

7. CARA PENILAIAN

- Masing-masing data hasil semua parameter ditentukan nilai tergetnya (modus) dari nilai konsensus.

- Hasil peserta dibandingkan dengan nilai target, dihitung skornya berdasarkan tingkatan masing-masing.

PAREMATER	SKOR
pH dan Berat Jenis	4 : hasil benar
	3 : hasil selisih 1 tingkat
	2 : hasil selisih 2 tingkat
	1 : hasil selisih 3 tingkat
Protein, Glukosa, Billirubin, Urobilinogen, Darah, Keton dan Lekosit	4 : hasil benar
	3 : hasil selisih 1 tingkat
	2 : hasil selisih 2 tingkat
	1 : hasil selisih >2 tingkat
Nitrit dan Tes Kehamilan	4 : hasil benar
	0 : hasil salah

Kriteria Nilai :

Nilai > 3.00 = Baik
 Nilai 2.01-3.00 = Cukup
 Nilai 1.01 – 2.00 = Kurang
 Nilai ≤ 1.00 = Buruk

8. EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dan hasil evaluasi bisa diunduh pada aplikasi <https://simpler.bblabkesmasmakassar.go.id>

CONTACT PERSON :
Admin PME (0811-4460-5444)